



CODE & EMBALLAGE

934 397 - Carton de 2 x 5 L

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : Liquide limpide visqueux incolore

Parfum : Sans parfum

pH : 8,25 ± 0,25

Densité : 0,995 ± 0,01

Matière active : BENZALKONIUM CHLORIDE [ADBAC/BKC (C12-C16)] (N° CAS 6 8424-85-1) ; 25 g/kg
DIDECYLDIMETHYLAMMONIUM CHLORIDE (N° CAS 7173-51-5) ; 25 g/kg



PERFORMANCE DÉTERGENT DÉSINFECTANT MÉDICAL

NETTOIE ET DÉSINFECTE LES SOLS ET SURFACES GÉNÉRALES, MÉDICALES* ET PARAMÉDICALES.

Détergent désinfectant pour sols, murs, surfaces, mobilier mais également matériels paramédicaux ou médicaux* (lits, tables d'opération, moniteurs...). Bon pouvoir mouillant. Produit BACTÉRICIDE, LEVURICIDE, FONGICIDE, VIRUCIDE, SPORICIDE et MYCOBACTÉRICIDE. Efficace sur Coronavirus et Clostridium Difficile.

MODE D'EMPLOI

Utilisation manuelle ou en autolaveuse.

Dosage : diluer 30 mL dans 4 L d'eau à température ambiante pour une désinfection bactéricide et levuricide en condition de saleté générale.

Dilution, températures et temps de contact variables selon l'efficacité biocide recherchée. Se référer au tableau des caractéristiques microbiologiques.

DOMAINES D'APPLICATION

Le PERFORMANCE DÉTERGENT DÉSINFECTANT MÉDICAL est idéal pour l'entretien régulier des locaux où peuvent se développer les micro-organismes (milieu médical*, paramédical, maisons de retraite, écoles, lieux publics, collectivités, restaurants, hotels etc.). *Hors bloc opératoire.

PRÉCAUTIONS

Produit strictement professionnel. Tenir hors de portée des enfants. Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage vide. Tenir à l'abri de la lumière, de la chaleur et du froid. Pour réduire l'impact environnemental, respecter les doses recommandées d'utilisation. Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d'eau. Recycler ou éliminer de préférence par un collecteur ou une entreprise agréée. Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

LÉGISLATION

La formule du PERFORMANCE DÉTERGENT DÉSINFECTANT MÉDICAL est soutenue au niveau du règlement biocide (CE) n°528/2012 en vue d'obtenir une AMM. Produit enregistré sous BioCID. Produit utilisé en TP2. SL - Concentré soluble.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande au 05 56 16 40 08 pour le personnel médical et sur le site internet www.performance-hygiene.fr. Formule déposée au centre antipoison européen (PCN) (N°5500). Numéro de téléphone d'appel d'urgence ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59 Les informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et n'ont d'autre but que de vous renseigner sur nos produits et leurs possibilités d'application. Elles sont données avec objectivité mais n'impliquent aucun engagement de notre part.

PERFORMANCE MÉDICAL

NETTOIE ET
DÉSINFECTE LES
SOLS ET SURFACES
GÉNÉRALES,
MÉDICALES* ET
PARAMÉDICALES.

*HORS BLOC OPÉRATOIRE.



CARACTÉRISTIQUES MICROBIOLOGIQUES

EFFICACITÉ	NORMES	CONDITIONS	°C	TEMPS	%	SOUCHES	
BACTÉRICIDE	EN 1276 EN 13697 EN 16615	Sauté générale	20°C	15 mn	0,75 %	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> <i>Escherichia coli</i> ¹ <i>Staphylococcus aureus</i> <i>Enterococcus hirae</i>	
				15 mn		<i>Listeria monocytogenes</i> <i>Salmonella enterica</i>	
				15 mn	1 %	<i>Legionella pneumophila</i>	
	EN 1276 EN 16615 EN 1650 EN 13697		40°C	15 mn	0,75 %	<i>Enterococcus faecium</i>	
				15 mn		<i>Listeria monocytogenes</i> <i>Salmonella enterica</i>	
	EN 13727 EN 17387 EN 16615	Sauté médicale	20°C	15 mn	1,5 %	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> <i>Escherichia coli</i> ¹ <i>Staphylococcus aureus</i> <i>Enterococcus hirae</i>	
				15 mn		<i>Listeria monocytogenes</i> <i>Salmonella enterica</i>	
			40°C	15 mn		<i>Enterococcus faecium</i> <i>Listeria monocytogenes</i> <i>Salmonella enterica</i>	
LEVURICIDE	EN 1650 EN 13697 EN 16615	Sauté générale	20°C	15 mn	0,75 %	<i>Candida albicans</i>	
			40°C	15 mn	0,75 %	<i>Legionella pneumophila</i>	
	EN 1276 EN 16615 EN 1650 EN 13697			15 mn	0,75 %	<i>Candida albicans</i>	
		EN 13624 EN 17387 EN 16615	Sauté médicale	20°C	15 mn	2 % ³	<i>Candida albicans</i>
				40°C		1,5 % ⁴	
						1,5 % ³	
1 % ⁴							
FONGICIDE	EN 1650 EN 13697 ²	Sauté générale	20°C	30 mn	5 %	<i>Aspergillus brasiliensis</i>	
			40°C	15 mn	5 %		
				30 mn	4 %		
		Sauté médicale	20°C	45 mn	4 %		
			40°C	30 mn	4 %		
VIRUCIDE (virus enveloppés)	EN 14476 EN 16777 ²	Sauté générale	20°C	15 mn	1,5 %	MVA	
			40°C	15 mn	1 %	<i>Hcov229E</i>	
			20°C	15 mn	1,5 %		
			40°C	15 mn	1 %		
		Sauté médicale	20°C	15 mn	2 %	MVA	
					<i>Hcov229E</i> <i>H1N1</i> humain		
			40°C	15 mn	1,5 %	MVA	
					<i>Hcov229E</i>		
MYCOBACTÉRICIDE ³	EN 14348	Sauté médicale	20°C	30 mn	5 %	<i>Mycobacterium terrae</i>	
						<i>Mycobacterium avium</i>	
SPORICIDE ³	EN 17126	Sauté médicale	20°C	60 mn	3 %	<i>Bacillus subtilis</i>	
			40°C	60 mn	2 %	<i>Clostridium difficile</i>	
			20°C	60 mn	3 %	<i>Bacillus cereus</i>	
			40°C	60 mn	2 %		

¹ Souche non testée en EN 16615.

² Résultats extrapolés avec action mécanique.

³ Sans action mécanique.

⁴ Avec action mécanique.